

Gebruiksaanwijzing

PICC-lijn Douchecover

1. Schuif deze cover, met de grootste opening boven, over uw arm tot boven de PICC-lijn. U kunt het materiaal uitrekken.

Schuif de onderste opening op totdat de gewenste afsluiting op de onderarm is bereikt.

2. Trek het bovenarm deel iets in tegengestelde richting zodat de seal (binnenzijde zwarte deel) contact maakt met de huid. Zo sluit de douchecover mooi af.

3. Verwijder de douchecover na het douchen voorzichtig over de PICC-lijn door de opening weer iets te rekken.



*Latexvrij | ISO 9001 | made in the UK



Wear to Care